

● **NEUES von HGT !**

Das Klingeln des Handys wird signalisiert, auch wenn Sie es nicht am Körper tragen!



GSM-Mobiltelefon

Funk →
Reichweite 1-2 m



MiniVib-Handsender HS1HM

Funk →
Reichweite 50-300 m



MiniVib-Empfänger
(4x4Vibrationen)

So funktioniert die Signalgebung über HGT-MiniVib ...

Der neue MiniVib-*Handsender* wird einfach in die Nähe des eingeschalteten Handys gelegt. Bei jedem Anruf, egal ob Sprache, Fax oder SMS, bemerkt der Handsender die Funk-

wellen, die das Handy macht und sendet daraufhin sein eigenes Funksignal bis zu 300 m weit an den MiniVib-Empfänger, der Sie mit einer gut erkennbaren Vibrationsfolge informiert.

... und so über das HGT-Lichtsystem:

Auch die neue Lichtglocke *MultiFlash* kann erkennen, wenn ein Handy in der Umgebung klingelt. Das Gerät selbst blitzt mit einer gut erkennbaren Blitzfolge und sendet gleichzeitig ein

Signal auf die Steckdosen Ihres 230-Volt-Stromnetzes, damit auch alle anderen HGT-Blitzlampen in Ihrer Wohnung blitzen. Auch die Kombination mit einem MiniVib-Funkumsetzer ist möglich.



GSM-Mobiltelefon

Funk →
Reichweite 1-2 m



MultiFlash
(4x4Lichtblitze)



Blitzlampe Control
(4x4Lichtblitze)

Vertriebsbüro Berlin:

Dipl.-Ing. Klaus Dickel
Karl-Marx-Allee 82
10243 Berlin

Tel.: 030/29449030
Fax: 030/29449031
ST.: 030/29449032

Firmensitz Altenberge:

Siemensstraße 13
48341 Altenberge
Internet: <http://www.hgt.de>

Tel.: 025 05/603
Fax: 025 05/36 59

Hörgeschädigten Technik B&K GmbH

hgt

SBHM01