

Manueller Funktionstest

Wenn Sie auf die Personenruftaste drücken, wird das Signal für Personenruf (☎) gesendet. Alle Empfänger müssen dann mit Blitz- oder Vibrationsfolgen für Personenruf reagieren. Danach leuchtet das Symbol noch bis zu 30 Min. lang, um anzuzeigen, dass die Funkverbindung weiterhin besteht.

Wartung und Pflege

Alle Produkte sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. Niemals starke oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

Wiedereinsatz

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Zur Desinfektion benutzen Sie bitte ausschließlich

haushaltsübliche Mittel. Beachten Sie hierzu auch die Pflegehinweise im vorstehenden Kapitel Wartung und Pflege.

Garantie

Auf alle HGT-Produkte geben wir eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur und den Rückversand. Die Kosten des Versands an uns und weitere Kosten tragen wir nicht.

Bei Störungen

Sollte Ihr Kombisender einmal nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Batterien noch voll sind, indem Sie einen manuellen Funktionstest durchführen (siehe oben). Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gern.

Ereignisse	Vibrationsfolge am Empfänger	Anzeige
Klingel (Türklingel):	* * * * *	☎
Telefon (Festnetz):	* * * * *	☎
Baby (Mikrofon):	* * * * *	☎
Personenruf (Taste):	** ** ** ** **	☎

Technische Daten

- Stromversorgung: 2 Batterien AAA 1,5V (Microzellen)
- Türklingel-Eingang: ca. 0,9 - 24 Volt, 0 - 1000 Hz
- Größe: 65 x 105 x 20 mm
- Gewicht: ca. 85 g
- Prüfzeichen: **CE**
- Farbe: schwarz
- Serien-Zubehör: 3 m TAE-Anschlusskabel
7m Klingel-Anschlusskabel (Spannungseingang)
- Sonder-Zubehör: 7m Klingel-Anschlusskabel (Kontakteingang)
3-fach Adapter TAE F-NFN
- Geeignete Empfänger: Drahtloses Vibrationskissen Typ 83.0
Funkblitzlampe Control Typ 82.2
MiniVib-Funkempfänger Typ 92.5



BA_8800_MV/KOMBISENDER10/15

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
Siemensstraße 13 • 48341 Altenberge • Tel. 02505/603 • FAX 02505/3659
Internet-Adresse: <http://www.hgt.de> • E-Mail: info@hgt.de

Kombisender Typ 88.0



Bedienungsanleitung





Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für das drahtlose Weck- und Warnsystem von HGT entschieden. - Sie können nun selbst entscheiden, ob Sie sich von der Funkblitzlampe Control, vom drahtlosen Vibrationskissen oder von beidem auf die Tür- oder Telefonklingel aufmerksam machen wollen wollen.

Inbetriebnahme des Kombisenders

Nach dem Einsetzen der Batterien drücken Sie bitte ein Mal kurz auf die Personenruftaste an der Vorderseite des Kombisenders. An Ihrem Empfänger (geeignete Empfänger auf der Rückseite) muss jetzt die Kontrollleuchte für den Personenruf (☎) blinken. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie Ihre(n) Empfänger noch auf den Kanal des Kombisenders einstellen.

Kanal am Empfänger einstellen

Ihr neuer Kombisender ist werkseitig auf den Kanal 0 eingestellt. Die-

se Einstellung ist immer dann richtig, wenn alle Ihre Empfänger auf den Kombisender reagieren sollen. Wenn nur bestimmte Empfänger auf diesen Kombisender reagieren sollen, müssen Sie den Kombisender auf einen anderen Kanal (1 bis 7) einstellen und die zugehörigen Empfänger danach auf den selben Kanal "programmieren".

Hinweis: Der Kanal 0 besitzt eine Sonderfunktion. Wird ein MiniVib-Sender auf Kanal 0 eingestellt, werden seine Signale von jedem Empfänger empfangen, unabhängig davon, auf welchem Kanal er selbst eingestellt ist.


Anschluss an Türklingel oder Sprechanlage

An der Unterseite des Kombisenders gibt es zwei Anschlussbuchsen für 2,5mm-Klinkenstecker.

Die linke Anschlussbuchse ist für Türklingeln, elektronische Gongs oder Sprechanlagen vorgesehen. Das dafür mitgelieferte Anschlusskabel ist so beschaltet, dass das freie Ende parallel zur Türklingel angeschlossen werden kann

(Spannungseingang). Mit etwas Geschick können Sie die Montage des mitgelieferten Klingelkabels selbst durchführen:

1. Deckel der Türklingel (nicht Klingeltaste) öffnen
2. Beide Schrauben lockern
3. Beide Kabelenden um die Schrauben legen und festschrauben
4. Deckel wieder schließen.
5. Stecker des mitgelieferten weißen Klingelanschlusskabels in die linke 2,5mm-Klinkensteckerbuchse des Kombisenders einstecken.

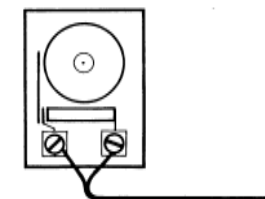

Hinweis: Wenn Sie eine Klingeltaste direkt an den Kombisender anschließen wollen, benötigen Sie dafür ein Anschlusskabel für Kontakteingang, das Sie kostenlos bei uns anfordern können.

Anschluss ans Telefon

Zum Anschluss an das Telefon wird das mitgelieferte TAE-Kabel verwendet. Stecken Sie dazu den 2,5mm-Klinkenstecker in den rechten Eingang des Kombisenders und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem N-codierten Ende des Kabels mit dem freien Steckplatz Ihrer Telefonsteckdose. Falls kein Steckplatz frei sein sollte, müssten Sie Ihre Telefonsteckdose mit einem 3-fach-Adapter TAE-F-NFN erweitern. HGT-Best.-Nr: 103A.

Automatischer Verbindungstest

Zum Test der Funkverbindung zwischen dem Kombisender und Ihren Empfängern sendet der Kombisender in regelmäßigen Abständen ein Kontrollsignal aus. Bei allen Empfängern, die auf dem selben Kanal eingestellt und in Reichweite sind, müssen Klingelsymbol oder/und Telefonsymbol dauerhaft leuchten, abhängig davon, welche Eingänge Sie benutzen.