

Personenruf-Sender

Typ 54.2


Funktion: Der Personenruf-Sender ist ein Sender des HGT-Lichtsystems. Er ist im privaten Bereich für bettlägerige Personen gedacht, die mit diesem Gerät auf sich aufmerksam machen können. Am Arbeitsplatz können über diesen Sender Hörgeschädigte gerufen werden. Beim Betätigen des Handdruckknopfes gibt der Sender Funksignale auf die Netzleitung. Die an die Netzleitung angeschlossenen Empfänger zeigen das Drücken des Handdruckknopfes mit 8 * 2 Lichtblitzen an.

Blitzfolge: 1 x Drücken = * * * * * * * * * *



Anschluss: Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose in der Nähe der bettlägerigen Person oder der Stelle, von der gerufen werden soll. Der Klinkenstecker des Personenrufkabels ist in die Buchse an der Unterseite des Personenruf-Senders einzustecken. Mit dem Ein- und Ausschalter an der Vorderseite wird der Sender in Betriebsbereitschaft gebracht.

Kontrolle: Beim Einschalten des Gerätes müssen alle Empfänger eine Blitzfolge abgeben, bei Empfängern mit Kontroll-Display leuchtet ständig das Personenruf-Symbol.

Daten:	Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
	Prüfzeichen:	
	Größe:	82 x 134 x 83 mm
	Gewicht:	ca. 230 g
	Farbe:	weiß
	Serien-Zubehör:	7 m Kabel mit Tastschalter zum Rufen