

Technische Daten

Stromversorgung:	2 Mignonzellen 1,5 Volt
Eingang:	1 - 24 Volt oder Schließkontakt
Abmessungen:	65 x 26 x 115 mm
Gewicht:	ca. 150 g
Prüfzeichen:	
Farbe:	hellgrau
Serien-Zubehör:	2m Anschlusskabel mit 3 poligem 3,5mm-Klinkenstecker

Hörgeschädigten
Technik B&K GmbH



Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
Siemensstr. 13 • 48341 Altenberge • Tel.: 02505 / 603 • Fax: 02505 / 3659
Internet: www.hgt.de • E-Mail: info@hgt.de


BA_7350_RÜTKIS02/13

Rüttelkissen Typ 73.5



Bedienungsanleitung



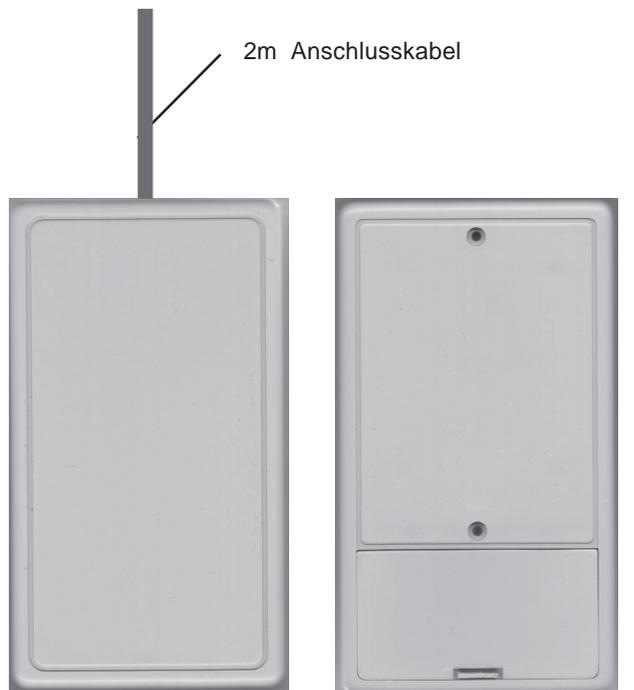

2m Anschlusskabel

Hier drücken, um Batteriefach zu öffnen.

Das Rüttelkissen von oben und von unten

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Rüttelkissens haben Sie sich für ein zuverlässiges und einfach zu handhabendes HGT-Produkt entschieden.

Das Funktionsprinzip des HGT-Rüttelkissens

Das Rüttelkissen hat einen kleinen Vibrationsgeber eingebaut, der immer dann vibriert, wenn ein an das Rüttelkissen angeschlossenes Gerät ein Ereignis meldet. Wenn Sie das Rüttelkissen z.B. beim Schlafen unter Ihr Kopfkissen legen, können Sie sich vom angeschlossenen Lichtwecker zusätzlich zu den Lichtblitzen auch durch Vibration wecken lassen.

Anschlussmöglichkeiten des Rüttelkissens

Das Rüttelkissen kann an die folgenden Geräte direkt angeschlossen werden:

HGT-Licht- und Funklichtwecker DCF77

Stecken Sie den 3,5mm-Klinkenstecker des Anschlusskabels einfach in die am Wecker vorgesehene Buchse. Das Rüttelkissen macht bei jedem Blitz

Ihres Lichtweckers eine Vibration. Sie können die Vibration dadurch unterbrechen, dass Sie den Weckalarm am Wecker abschalten.

Falls Sie einen HGT-Funklichtwecker DCF77 besitzen, vibriert das Kissen auch dann, wenn ein Sender des HGT-Lichtsystems ein Ereignis, z.B. das Klingeln des Telefons, meldet.

HGT-MiniVib-Adapter

Stecken Sie den 3,5mm-Klinkenstecker des Anschlusskabels in die an der Seite des MiniVib-Adapters angebrachte Buchse. Immer dann, wenn der Adapter die Vibration des aufgelegten MiniVib-Empfängers registriert, vibriert auch das Rüttelkissen. Sie können die Vibrationen dadurch unterbrechen, dass Sie den kleinen weißen Knopf am MiniVib-Empfänger kurz einmal drücken.

Hinweis: Wenn Sie das Rüttelkissen zusammen mit einem MiniVib-Adapter betreiben, brauchen Sie in den MiniVib-Adapter keine Batterien einzulegen. Der Adapter wird dann automatisch durch das Rüttelkissen versorgt.

Reisewecker Shake-Awake

Stecken Sie den 3,5mm-Klinkenstecker des Anschlusskabels in die Buchse an die an der rechten Seite des Reise- weckers. Bei jedem Alarm des Weckers vibriert nun auch Ihr Rüttelkissen.

den Wecker oder den MiniVib-Adapter eingesteckt ist.

Wenn Sie keinen Fehler finden können, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.

Batteriewechsel

Drücken Sie mit dem Fingernagel die Lasche des Batteriefachdeckels nach innen, um das Batteriefach zu öffnen.



Legen Sie die beiden Mignonzellen so in das Batteriefach ein, wie auf der Abbildung.

Bei Störungen

Sollte Ihr HGT-Rüttelkissen einmal nicht ordnungsgemäß arbeiten, überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Batterien noch ausreichend voll sind und ob der Stecker des Vibrationskissens auch in