



## HGT Hörgeschädigten Technik

Mit viel Leidenschaft und Ideenreichtum entwickeln, produzieren und vertreiben wir seit mehr als 35 Jahren Lichtsignalanlagen und Kommunikationshilfsmittel, um die Lebensqualität von Hörgeschädigten im privaten Bereich und am Arbeitsplatz zu steigern. Die bewährten Blitzlampen des HGT-Lichtsystems machen auf akustische Ereignisse in der Wohnung, wie z. B. das Telefon- oder Türklingeln, durch helle Lichtblitze aufmerksam.

Mit unseren neuen drahtlosen Produkten Digitalwecker, Rauchwarnmelder und Vibrationskissen werden Sie zuverlässig zur eingestellten Uhrzeit geweckt und zusätzlich bei Rauchentwicklung in der Wohnung gewarnt.



## Kombisender

Sie wollen sich mit Blitzlampen und Vibrationskissen auch anzeigen lassen, wenn jemand an der Tür klingelt, das Telefon läutet oder Ihr Baby weint? - Dann brauchen Sie den Kombisender!

Die Montage ist denkbar einfach. Das batteriebetriebene Gerät wird mit Klettband neben der Klingel befestigt und mit einem kurzen Kabel mit Türklingel oder Telefonsteckdose verbunden.


Ein externes Mikrofon zur akustischen Ankopplung an Türklingeln, Türsprechanlagen oder zur Verwendung als Babyphon ist in Vorbereitung.



Zum Betrieb des Kombisenders ist mindestens ein Empfänger, z.B. eine Funkblitzlampe oder ein Drahtloses Vibrationskissen erforderlich.

## Das drahtlose Warnsystem von HGT

vertrieben durch:

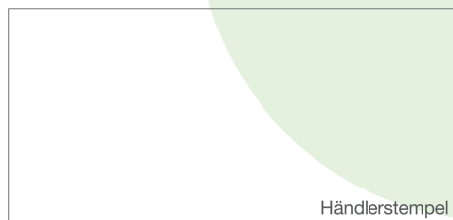

Händlerstempel



Hörgeschädigten Technik B&K GmbH  
Siemensstraße 13 · 48341 Altenberge  
Telefon: +49 (0)2505 603 · Telefax: +49 (0)2505 3659  
E-Mail: [info@hgt.de](mailto:info@hgt.de) · Internet: [www.hgt.de](http://www.hgt.de)

## Das drahtlose Warnsystem



## Die optimale Kombination

Mit dem neuen Digitalwecker, dem Rauchwarnmelder und dem Drahtlosen Vibrationskissen haben Sie die optimale Kombination für Ihr Schlafzimmer. Sie werden sekunden genau zur eingestellten Uhrzeit geweckt und zusätzlich im Brandfall vor gefährlicher Rauchentwicklung gewarnt - und weil alle Geräte mit Batterien versorgt werden, funktioniert das Ganze auch während eines Stromausfalls.

Die ordnungsgemäße Funktion der Geräte wird automatisch überwacht und kann durch kurzes Umdrehen des Vibrationskissens oder durch Druck auf die Snooze-Taste des Weckers am Vibrationskissen angezeigt werden.

Hinweis: In fast allen Bundesländern besteht inzwischen Rauchwarnmelderpflicht. Im Juni 2014 hat das Bundessozialgericht Kassel bereits entschieden, dass Gehörlose und hochgradig Schwerhörige gegenüber Ihren Krankenkassen Anspruch auf die Kostenübernahme für spezielle Rauchwarnmelder haben (BSG-Urteil Az.B 3 KR 8/13 R).



## Funkblitzlampe Control

Die Funkblitzlampe Control weckt Sie mit hellen Lichtsignalen, wenn die am Digitalwecker eingestellte Weckzeit erreicht ist oder wenn der Rauchwarnmelder Sie vor Rauchentwicklung warnt. - Wenn ein Kombisender vorhanden ist, kann die Funkblitzlampe auch anzeigen, wenn jemand an der Haustür klingelt, das Telefon läutet oder wenn das Baby weint. - Auf dem beleuchteten 6-fach-LC-Display können Sie jederzeit ablesen, welche Sender in Betrieb sind. Außerdem wird dort angezeigt, wenn bei einem Sender die Batterie gewechselt werden muss.

## Digitalwecker

Der neue Digitalwecker aktiviert beim Erreichen der eingestellten Weckzeit das Drahtlose Vibrationskissen. Wenn Sie wollen, können Sie sich wahlweise oder zusätzlich auch von der Funkblitzlampe Control wecken lassen. Der neue Wecker stellt sich automatisch per Funk auf die genaue Uhrzeit ein. Und wenn einmal kein Funkempfang der Uhrzeit möglich ist, z. B. auf Fernreisen, kann die Uhrzeit auch manuell eingestellt werden. - Damit ist der neue Digitalwecker von HGT auch ein idealer Reisebegleiter.

## Rauchwarnmelder

Der neue Rauchwarnmelder warnt vor Rauchentwicklung in der Wohnung durch ein lautes Piepsignal (>85 dBA) und aktiviert gleichzeitig per Funk die Funkblitzlampe Control, das Drahtlose Vibrationskissen und weitere in der Wohnung vorhandene Funkblitzlampen Control. Eine schwache Batterie oder der Ausfall des Rauchwarnmelders wird an den Empfängern signalisiert. Mit dem Testknopf kann die Funktion des Rauchmelders jederzeit getestet werden.

## Drahtloses Vibrationskissen

Das neue Vibrationskissen wird unter das Kopfkissen gelegt. Es empfängt die Signale von Rauchwarnmelder, Digitalwecker und von weiteren vorhandenen Sendern, z. B. vom Kombisender für Tür- und Telefonklingel. Mit gut unterscheidbaren Vibrationssignalen und durch das Blinken einer zugeordneten Leuchtdiode macht es Sie auf akustische Ereignisse aufmerksam, die Sie sonst nicht wahrnehmen würden. Die Batterien reichen bei normalem Gebrauch für etwa 4 Wochen und können leicht ausgetauscht werden.



Zum Betrieb der Funkblitzlampe Control ist mindestens ein Sender, z. B. ein Digitalwecker oder ein Rauchwarnmelder erforderlich.



Zum Betrieb des Digitalweckers ist mindestens ein Empfänger, z. B. ein Drahtloses Vibrationskissen oder eine Funkblitzlampe erforderlich.



Zum Betrieb eines Rauchwarnmelders ist mindestens ein Empfänger, z. B. ein Drahtloses Vibrationskissen oder eine Funkblitzlampe erforderlich.



Zum Betrieb eines Drahtlosen Vibrationskissens ist mindestens ein Sender, z. B. ein Digitalwecker oder ein Rauchwarnmelder erforderlich.