

MiniVib-Funkblitzlampe *Control*

Typ 92.2

Funktion: Die MiniVib-Funkblitzlampe *Control* ist ein Empfänger des HGT-MinVib-Systems. Im Unterschied zum MiniVib-(Vibrations-)Empfänger zeigt sie die Ereignisse durch Lichtblitze im Rhythmus der empfangenen Funksignale an. Dadurch kann eine Signalisierung von Ereignissen auch dann erfolgen, wenn ein MiniVib-Empfänger nicht am Körper getragen werden kann, z.B. beim Duschen oder nachts, beim Schlafen. Das entsprechende Segment der Control-Anzeige blinkt noch eine Minute nach erfolgtem Empfang, so dass auch nach Ende der Blitzfolge noch deutlich erkannt werden kann, von welchem Sender ein Ereignis gemeldet worden ist.

Durch den Aufstellfuß, der als Zubehör lieferbar ist, kommt die Funkblitzlampe auch dort zum Einsatz, wo Steckdosen ungünstig in Bodenhöhe angeordnet sind oder z.B. durch Schränke verdeckt sind.

Blitzfolge: 8 gut unterscheidbare Blitzfolgen, abhängig vom Sender.



MiniVib-Funkblitzlampe *Control*




Aufstellfuß für Funkblitzlampe

Anschluss: Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose.

Kontrolle: Bei Einzelbetrieb (nur ein MiniVib-Sender vorhanden) wird die Funkverbindung zwischen Sender und MiniVib-Funkblitzlampe automatisch überwacht. Das zugehörige Leuchtfeld auf der LCD leuchtet bei fehlerfreier Funkverbindung ständig.

Ist mehr als ein Sender in Betrieb, kann durch einmaligen Druck auf die Personenruftaste des Senders ein (Test-)Empfang ausgelöst werden.

Hinweis: Die MiniVib-Funkblitzlampe *Control* hat 8 Buchstaben-Kanäle (A-H).

Daten:	Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
	Prüfzeichen:	
	Größe:	90 x 122 x 65 mm
	Gewicht:	ca. 200 g
	Farben:	anthrazit, hellgrau, rot, weiß